

Einfach verbinden.

Sicher verriegeln.

Schnell lösen.

Einhändig.

LOXX[®]
Made in Germany!



Ein Quantensprung
im Reha-Bereich!



Suchen Sie schon lange nach einer schnellen,
sicheren und einfachen Verbindung, die
auch noch **einhändig** zu bedienen ist?

Sie haben diese heute gefunden!

Mit LOXX® werden Sie erstmalig eine Verbindung
erleben, die automatisch schließt und verriegelt,
jedoch kinderleicht einhandig zu öffnen ist.

Wir stellen Ihnen unseren Klick-Verschluss vor.

LOXX®
Made in Germany!

Funktion

Der Klick-Verschluss **LOXX®** besteht aus zwei Komponenten: einem Oberteil mit der innenliegenden LOXX®-Edelstahlfeder, und einem Unterteil mit dem genormten Kugelpopf (dem Gegenstück).

Beim Verbinden legt sich die Feder des Oberteils sanft, aber sicher um den Kugelpopf des Unterteils und **verriegelt automatisch**. Die Verbindung kann sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Durch Anheben der Kappe am Oberteil erreichen Sie, dass die spezielle LOXX®-Feder den Kugelpopf wieder freigibt und sich die Verbindung lösen lässt.

Edelstahlfeder
im Inneren des
LOXX® Oberteils




LOXX® Unterteil (Beispiel)
mit Kugelpopf



Oberteile

Für eine perfekte Griffigkeit sorgt das LOXX® Oberteil mit **großer Kappe**. Dieses Oberteil können Sie mit Leichtigkeit einhändig „kneifen“, so dass die Feder der Kappe kinderleicht den Kugelkopf freigibt:

**Montiertes LOXX® Oberteil
mit großer Kappe.**

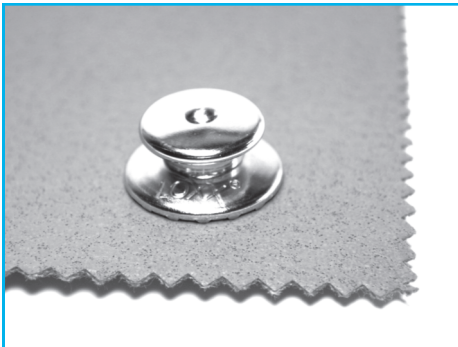

**Durch einhändiges Anheben
(kneifen) der Kappe löst sich
die Verbindung.**



Das Oberteil mit glatter Kappe ist ebenfalls sehr benutzerfreundlich. Die glatte Oberfläche der Kappe ist mitunter eine Stilfrage. Sie eignet sich hervorragend, um beispielsweise ein Firmenlogo drauf zu lasern.

LOXX® Oberteil:

mit glatter Kappe



mit glatter Kappe und Ring



Unterteile

Unabhängig davon, welches LOXX®-Unterteil Sie für Ihre Anwendung benötigen, stets haben alle Gegenstücke der LOXX®-Familie den gleichen, perfekten Kugelkopf, der Ihnen eine sanfte, aber sichere Verbindung garantiert.

Entdecken Sie, welche Anbringungsmöglichkeiten Ihnen das Klick-System LOXX® bietet:


LOXX® Unterteil:

**selbstschneidende
Schraube**



metrische Schraube

Standardmäßig in M4, M5 und
M6.

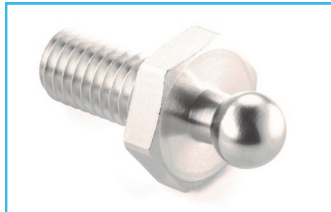


**Stoffschraube für Stoff-
auf-Stoff-Verbindungen**



LOXX® Unterteil:

Kleine, ovale Platte

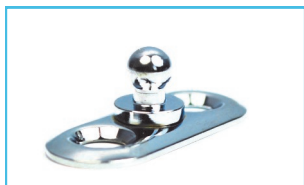

große, ovale Platte



zum Nieten



LOXX® Unterteil:

offene Rohrschelle



annähbares Unterteil



klebbares Unterteil



Werkzeug & Montage

Um das **LOXX® Oberteil bzw. die Stoffschraube** zu montieren, benötigen Sie keine Maschinen. Zum Anbringen und Festziehen der Scheibe ist lediglich der kleine Schlüssel oder der große Schlüssel mit ergonomisch geformten Holzgriff notwendig.

Optional können Sie auch den Aufsatz für Elektrobohrer verwenden.

Kleiner LOXX®-Schlüssel




Großer LOXX®-Schlüssel



**Rechts: LOXX® Aufsatz
für Elektrobohrer**



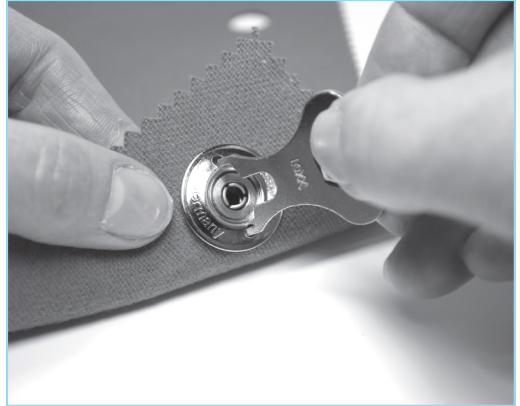

Die **LOXX®-Unterteile** können je nach Ausführung geschraubt, genietet, genäht oder geklebt werden. Dafür sind lediglich gängige Werkzeuge wie Schraubendreher, 9mm-Sechskantdreher, Nietstempel, Nähnadel/Faden oder Kraftkleber* notwendig.

***Kleber:** Entscheidend ist auf welche Oberfläche Sie das LOXX®-Unterteil kleben möchten.
Bitte fragen Sie zur Sicherheit einen Fachmann.

Anwendungsbeispiele für den

Medical-Care-Bereich:

An Rollstuhl/Rollator: die Rohrschelle (ohne zu bohren) oder die LOXX® Schraube direkt anbringen und Sonnenschutz, Regenverdeck, Winterdecke, Tasche, Netz, Behälter, etc. *schnell und sicher* befestigen, *mühelos* entfernen.

An (Kranken)Betten: die Rohrschelle (ohne zu bohren) oder die LOXX® Schraube direkt anbringen und Mückennetz, Lichtschutz, Sauerstoffzelt, Sommer/Winterdecke, Urinbeutel, Messgerät, Halterung für Behälter, Fixierung, etc. *schnell und sicher* befestigen, *mühelos* entfernen.

An Kleidung: zum *sicheren* Schließen von Jacken, Mänteln, Gürteln, Hosen, Schuhen, etc.

Als Trainingshilfe: zum Üben einer gezielten Bewegung kann die LOXX®-Verbindung immer wieder geklickt und gelöst werden. Das kann zu einem gezielten Koordinations-, Hand- oder Fingertraining beitragen.

Für den Transport: Klicken Sie Ihre Behälter, Flaschen, Gefäße, Deckel schnell und sicher fest.

Als Unterstützung für Brettspiele: bei zitterigen Händen oder unkontrollierten Bewegungen kann ein Spielbrett mit LOXX® ausgestattet **die Lösung** sein. Denn mit LOXX® können die Spielfiguren nicht mehr unbeabsichtigt verschoben, umgeworfen oder durcheinander gebracht werden. Wir haben es getestet und als Beispiel ein Schachbrett und ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Brett ausgestattet. *Klarer Vorteil, klasse Ergebnis!*

*Das sind nur ein paar unserer Ideen für einen gezielten Einsatz im Medical-Care-Bereich. Als Spezialist werden **Sie** noch weitere, interessante Anwendungsmöglichkeiten entdecken und LOXX® in Ihrem Bereich nicht mehr missen wollen.*

Davon sind wir überzeugt!

Besuchen Sie unsere Webseite und erfahren Sie alles über das geniale LOXX®-Klick-System:

www.loxx-produkte.de / www.loxx-products.com



***Lernen Sie LOXX® kennen.
Sie werden begeistert sein!***

Schaeffertec GmbH

Kleinbeckstr. 7

45549 Sprockhövel

Germany

+ 49 2324 9049 - 0

welcome@schaeffertec.de

www.loxx-produkte.de

www.loxx-products.com

Schæffertec